

## alkalischer Schaum – Flächenreiniger (Eiweißlöser)

Zur Reinigung von Flächen und Gegenständen in Krankenhaus, Praxis & Labor. Löst zuverlässig Proteine und beseitigt den Biofilm, z.B. von Arbeitsflächen, Instrumenten, Dentalwerkzeugen, Hilfsmitteln u.a. Medizinprodukten. Ideal zur Reinigung vor der Desinfektion bzw. Sterilisation. Zur HACCP konformen Reinigung von Flächen und Gegenständen, z.B. Arbeitsflächen, Küchengeräten, Konvektomaten u.v.m., in der Lebensmittelindustrie, Küche & Catering, Hotel, Gastronomie.

### Wirkung

ProKleen löst hartnäckige proteinhaltige Beläge wie Fett, Stärke, Blut u.v.m. und kann somit den „Eiweißfehler“ bei der Desinfektion verhindern.

### Anwendung

Die Reinigung kann manuell oder mittels Reinigungsgeräte (z.B. Ultraschallbad) erfolgen, je nach Einsatzgebiet und Verschmutzungsgrad. Empfohlen wird eine Dosierung von 3-5 %, bei hartnäckigen Verschmutzungen pur anwenden und 10-15 Minuten einwirken lassen. Danach müssen die Flächen mit Wasser abgespült werden.

### Eigenschaften

ProKleen ist flüssig/farblos und hat einen leicht seifigen Geruch, pH-Wert > 13.

**Darf nicht in Händen von Kindern gelangen.** Inhalt/Behältnis gemäß den örtlichen, regionalen, nationalen, internationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen, Behälter verschlossen und bei Raumtemperatur lagern. Vor Frost, Hitze und direkter Sonnenstrahlung schützen.

### Inhaltsstoffe

< 5 % nichtionische Tenside  
Natriumhydroxid



### Vorteile auf einen Blick

- universal einsetzbar, auch Ultraschall
- sehr gute Reinigungskraft
- HACCP konform
- biologisch Abbaubar
- nachhaltig, Zuckertenside



### Lieferformen und Preise

Art.Nr. 20222500 500 ml Schaumflasche 9,50 €  
Art.Nr. 20225 5 Liter Kanister 22,50 €

Preise verstehen sich netto zzgl. MwSt.